

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

## HALO VEST

### PRODUCT VERBETERING – VERBETERDE CPR TOEGANG

10 April 2017

#### Betreffende producten

<b>Össur Halo Vest</b>	<b>Lil Angel Halo Vest</b>
545700L	545100K
545800L	545100L
545700K	545100S
545800K	545150K
545700S	545150L
545800S	545150S

#### ATTENTIE

Het is voor Össur erg belangrijk om aan haar klanten kwalitatief hoogwaardige medische hulpmiddelen te leveren.

Een halo vest beperkt de bewegingsvrijheid richting de borst in het geval van een acute noodsituatie. Met deze reden vinden we het belangrijk om onze gewaardeerde klanten te informeren over deze veiligheidswaarschuwing. Deze veiligheidswaarschuwing legt uit hoe het halo vest zorgvuldig verwijderd kan worden, evenals de vereiste aanvullende acties.

In een poging om de zichtbaarheid te verbeteren van de instructies voor het verwijderen van het product in het geval van een acute noodsituatie, heeft Össur de noodsituatie CPR toegang labeling voor de Össur Halo en Össur Lil Angel vesten opnieuw ontworpen. Naast de verbeterde zichtbaarheid, wordt bij het nieuwe label gebruik gemaakt van symbolen die universeel begrepen kunnen worden.

#### ACTIE

Zorg ervoor dat alle betrokken personeelsleden worden getraind in de juiste verwijdering van het Halo en Lil Angel vest tijdens noodgevallen. Raadpleeg de meegeleverde CPR instructie documenten voor Halo en Lil Angel.

**VERVANGING NOODGEVALLEN CPR TOEGANG LABELS**

New adult vest label = Nieuw etiket op vest voor volwassenen

Existing adult vest label = Huidig etiket op vest voor volwassenen

New Adult Vest Label



Existing Adult Vest Label



New pediatric vest label = Nieuw etiket op pediatriesch vest

Existing pediatric vest label = Huidige etiket op pediatriesch vest

New Pediatric Vest Label



Existing Pediatric Vest Label



Sticker loose in bag

< Sticker zit los in de verpakking

Deze mededeling dient te worden meegedeeld aan alle betrokken personen binnen uw organisatie, en voor elke andere organisatie en betrokkenen waar de betreffende producten aan zijn verstrekt of van service zijn voorzien.

Wij vragen uw aandacht voor deze berichtgeving en de aanbevolen acties.

Voor meer informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het onderstaande telefoonnummer: Tel: +31 (0)499 462 840

.....  
.....