

14 maart 2019

## URGENT - VELDVEILIGHEIDSMEDEDELING

Type maatregel	Recall
Teleflex-referentie	EIF-000353
Handelsnaam	Gibeck HME Filter + Katheter Koppelstuk RUSCH Katheter Koppelstuk RUSCH Connectoren Bulk voor ademhalingscircuits RUSCH Connectoren voor ademhalingscircuits
Productcode/Partijnummer	Raadpleeg Bijlage 4

Geachte klant,

### Bijzonderheden over de aangetaste apparaten

Teleflex heeft een vrijwillige correctieve veldveiligheidsactie (FSCA) opgezet voor het hierboven vermelde product; raadpleeg Bijlage 4 voor een lijst met productcodes en aangetaste partijen.

### Beschrijving van het probleem & vereiste directe acties

Teleflex Medical zet een correctieve veldveiligheidsactie op voor de bovengenoemde producten, omdat de mogelijkheid bestaat dat de draaibare en cobb-connectoren loslaten tijdens gebruik. Als dit loslaten gebeurt vóór gebruik, moet dit tijdens de installatie gemakkelijk door de gebruiker kunnen worden geïdentificeerd. Als het loslaten gebeurt tijdens gebruik en zich voordoet als een lek in het ademhalingscircuit, zal het ventilatordrukalarm afgaan en is mogelijk een ingreep nodig om de connector te vervangen door een ander katheterkoppelstuk of anders het ademhalingscircuit direct opnieuw te verbinden met de endotracheale buis totdat een ander nieuw katheterkoppelstuk beschikbaar is. Het vervangen van het katheterkoppelstuk vertraagd is of het opnieuw aansluiten van het ademhalingscircuit vertraagd is, kan de lekkage leiden tot desaturatie totdat het katheterkoppelstuk is vervangen en normale beademing wordt herkregen.

Onze gegevens duiden erop dat u een product hebt ontvangen dat teruggeroepen moeten worden. We laten onze klanten weten dat ze de volgende acties moeten ondernemen:

**Belangrijke opmerking: houd u zich, afhankelijk van de locatie van uw apparaat, enkel aan de volgende actielijst:**

Locatie van apparaat	Nummer op de actielijst
Eigen situatie	1
Medische instellingen (ziekenhuizen, medisch personeel enz.)	2
Distributeurs	3

## **Nummer op actielijst 1**

### **Eigen situatie**

1. Wij verzoeken u uw voorraad controleren op product binnen het kader van deze FSCA; raadpleeg Bijlage 4 voor de lijst met aangetaste codes & partijen. Gebruikers moeten **stoppen met het gebruik** van aangetaste producten en deze direct in quarantaine zetten. Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger van klantenservice.
2. Als een in Bijlage 4 vermeld product reeds in gebruik is, raad Teleflex aan het katheterkoppelstuk te vervangen. Raadpleeg Bijlage 3 voor een lijst met codes voor vervangende producten van Teleflex.
3. Als u geen voorraad zoals vermeld in Bijlage 4 hebt, vink dan het overeenkomstige vakje aan op het bevestigingsformulier (Bijlage 1) en stuur het formulier terug naar het hieronder vermelde faxnummer of e-mailadres.
4. Als u wel voorraad zoals vermeld in Bijlage 4 hebt, vink dan het overeenkomstige vakje aan op het bevestigingsformulier (Bijlage 1) en stuur het formulier terug naar het hieronder vermelde faxnummer of e-mailadres.
5. De klantenservice zal daarna contact met u opnemen voor het retourneren van de aangestate producten.
6. Teleflex (of uw plaatselijke dealer) zal u een creditnota uitschrijven na ontvangst van het teruggestuurde aangetaste product.
7. **Als u meer informatie of ondersteuning wenst met betrekking tot het vinden van een alternatief product, gelieve dan contact op te nemen met uw vertegenwoordiger van klantenservice.**

## **Nummer op actielijst 2**

### **Medische instellingen**

1. Wij vragen u uw voorraad te controleren op het product binnen het kader van deze FSCA. Gebruikers dienen te stoppen met het gebruik en de distributie van de voorraad van het aangetaste product en het onmiddellijk in quarantaine zetten. Medische instellingen hebben twee opties.
  - a. U kunt dan alle producten die van toepassing zijn terugsturen naar Teleflex; raadpleeg Bijlage 4 voor de lijst met aangetaste codes & partijen.
  - b. Als alternatief kunt u de producten inspecteren en alleen dat product terugsturen dat defect is. Raadpleeg Bijlage 2 voor gedetailleerde inspectie-instructies.
2. Als een product van toepassing is, raad Teleflex aan het katheterkoppelstuk te vervangen. Raadpleeg Bijlage 3 voor een lijst met codes van vervangende producten.
3. Als u geen voorraad hebt in het kader van deze FSCA, vink dan het betreffende vakje aan op het bevestigingsformulier (Bijlage 1) en stuur het formulier terug naar het hieronder vermelde faxnummer of e-mailadres.
4. Als u wel voorraad zoals vermeld in Bijlage 4 hebt, vink dan het overeenkomstige vakje aan op het bevestigingsformulier (Bijlage 1) en stuur het formulier terug naar het hieronder vermelde faxnummer of e-mailadres.
5. De klantenservice zal daarna contact met u opnemen voor het retourneren van de aangestate producten.
6. Teleflex (of uw plaatselijke dealer) zal u een creditnota uitschrijven na ontvangst van het teruggestuurde aangetaste product.

## Nummer op actielijst 3

### Distributeurs

1. Geef dit veldveiligheidsbericht aan al uw klanten die een product hebben ontvangen dat onder deze FSCA valt. Uw klant is dan verplicht om het bevestigingsformulier in te vullen en dit naar u te retourneren.
2. Raadpleeg Bijlage 3 voor een lijst van alternatieve producten van Teleflex en gelieve klantenservice van Teleflex te bellen mocht u hiervoor assistentie nodig hebben.
3. Wij vragen u uw inventaris te controleren op product binnen het kader van deze FSCA. Gebruikers moeten stoppen met gebruik en distributie van voorraad van aangetast product en het onmiddellijk in quarantaine zetten. Distributeurs hebben twee opties
  - a. U kunt dan alle producten die van toepassing zijn terugsturen naar Teleflex; raadpleeg Bijlage 4 voor de lijst met aangetaste codes & partijen.
  - b. Als alternatief kunt u de producten inspecteren en alleen dat product terugsturen dat defect is. Raadpleeg Bijlage 2 voor gedetailleerde inspectie-instructies.
4. Als distributeur is het uw verantwoordelijkheid Teleflex te bevestigen dat u de hierboven aangegeven activiteit hebt uitgevoerd. Als u klaar bent met uw acties, gelieve dan het ingevulde bevestigingsformulier door te sturen naar Klantenservice.
5. Het dient vermeld dat alle bevoegde instanties van de betrokken lidstaten van de Europese Economische Ruimte/Zwitserland (EER/CH) en Turkije waaraan Teleflex rechtstreeks levert, door Teleflex op de hoogte zullen worden gebracht.
6. Als u een distributeur bent en dit product verder heeft gedistribueerd buiten uw land, meld dit dan aan Teleflex met een retour-e-mail naar onderstaand e-mailadres.
7. Als u een distributeur bent en/of een rapporterende verantwoordelijkheid hebt in of buiten het EER/CH/TK- gebied, breng dan uw plaatselijke gemachtigde instantie van deze actie op de hoogte. Stuur deze berichtgeving en alle communicatie met uw plaatselijke gemachtigde instantie door naar Teleflex.

### Teleflex

Teleflex brengt alle klanten, werknemers van Teleflex en distributeurs op de hoogte van deze correctieve veldveiligheidsactie.

### Doorgeven van deze veldveiligheidsmededeling

Deze mededeling moet worden doorgegeven aan alle mensen die dit moeten weten binnen uw organisatie of aan elke organisatie waar de mogelijk aangetaste instrumenten naar zijn overgebracht. Denk bij het rondsturen van deze mededeling bijvoorbeeld aan eindgebruikers, clinici, risicomangers, aanvoerketen/distributiecentra enzovoort. Blijft u zich bewust van deze mededeling totdat alle vereiste acties zijn voltooid in uw organisatie.

### Contact referentiepersoon

Als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft met betrekking tot dit probleem, gelieve contact op te nemen met:

#### Klantenservice

**Contactpersoon:** Sales Assistants

**Fax:** +31 (0) 88 0021510

**Telefoon:** +31 (0) 88 0021500

**E-mail:** Productcomplaints.netherlands@teleflex.com

Het dient vermeld dat alle gemachtigde instanties van de getroffen lidstaten van het Europese Economische gebied/Zwitserland (EER/CH) en Turkije waaraan Teleflex rechtstreeks levert door Teleflex op de hoogte zullen worden gebracht. Teleflex verbindt zich ertoe om hoogwaardige, veilige en doeltreffende producten aan te bieden. We bieden onze oprechte verontschuldigheden aan voor enig ongemak dat u door deze actie mogelijk hebt ervaren. Als u vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger of de Klantenservice.

*Voor en namens Teleflex,*

...




**INSPECTIE-INSTRUCTIES**

**Alleen van toepassing op medische instellingen en distributeurs**

Product in het kader van deze correctieve veldveiligheidsactie (FSCA) bevat identificatienummers (ID's) gestempeld op de Cobb-connector. Hoewel Teleflex het kader van deze actie niet kon verfijnen via partijnummers, kan product worden afgescheiden aan de hand van het ID-nummer in voldoende en niet-voldoend. Dit is een optionele inspectiestap alleen voor medische instellingen en distributeurs. Mocht u alle aangetaste codes en partijen willen terugsturen zonder deze inspectie uit te voeren, dan kan dat.

**Instructies:**

1. Als product nog in de verpakking zit (d.w.z niet in situ) moet het mogelijk gemaneuvreerd worden in de verpakking, zodat het ID-nummer duidelijk zichtbaar is. Zie Figuur 1 en Figuur 2 hieronder voor de locatie van het ID-nummer.
2. Producten moeten visueel geïnspecteerd worden om het op het product gestempelde ID te identificeren.
3. Als het ID-nummer op het product vermeld staat in de lijst onder onderstaande tabel 1, is het product potentieel niet-voldoend product en moet worden teruggestuurd naar Teleflex.
4. Als het ID-nummer op het product niet vermeld staat in de lijst onder onderstaande tabel 1, kan u het product gebruiken.

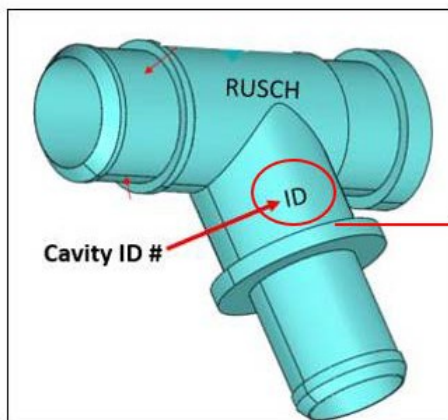

**Figuur 1 – Cobb-connector**

**Figuur 2 – Identificatienummer (ID)**

ID-nummers	
<b>Niet-voldoend product</b>	
39	Als het op het katheterkoppelstuk gestempelde ID-nummer 39, 42, 45 of 48 is - <b>Stuur terug</b> naar Teleflex
42	
45	
48	

**Tabel 1**

Vervangend Teleflex-product Codes & Opmerkingen				
Productcode in het kader van de veldactie	Vervangend product 1	Vervangend product 2	Vervangend product 1 - Commentaar	Vervangend product 2 - Commentaar
191010-000100	191009-000100	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191010-000150	191009-000150	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191010-000200	191019-000200	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191010-T00150	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191011-000050	191009-000050	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191011-000100	191009-000100	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191011-000150	191009-000150	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191011-000200	191019-000200	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191011-000300	191020-000300 (alleen in 22F)	22531	rechte connector	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191013-000150	191009-000150	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191013-000200	191019-000200	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191013-000250	191020-000300	22531	rechte connector in 30cm	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191014-000100	191025-000100	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191014-000150	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191014-000200	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191014-T00150	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191015-000050	191021-000050	22531	rechte connector	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191015-000100	191025-000100	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191015-000150	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191015-000200	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-

Vervangend Teleflex-product Codes & Opmerkingen				
Productcode in het kader van de veldactie	Vervangend product 1	Vervangend product 2	Vervangend product 1 - Commentaar	Vervangend product 2 - Commentaar
191015-T00150	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191033-000000	191009-000100	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191034-000000	191009-000100	22531	gefixeerde elleboog	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine
191036-000000	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191037-000000	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191525-000000	1624	-	Elleboogconnector zonder draai	-
191526-000000	1624	-	Elleboogconnector zonder draai	-
191527-000000	1624	-	Elleboogconnector zonder draai	-
191569-000000	1624	-	Elleboogconnector zonder draai	-
191657-000150	19092	-	gefixeerde elleboog & filter	-
191658-000100	19092	-	gefixeerde elleboog & filter	-
191658-000150	19092	-	gefixeerde elleboog & filter	-
191659-000150	19092	-	gefixeerde elleboog & filter	-
191727-000150	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191727-000200	22531	-	14-20cm met dubbele draai, maar alleen met 22F aan de kant van de machine	-
191771-518150	19092	-	gefixeerde elleboog & filter	-

Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	
Gibeck HME Filter + Katheter Koppelstuk	191657 - 000150	201745	RUSCH Katheter Koppelstuk	191015 - 000100	18BT13	
		201749			18CT03	
		201802			18CT12	
		201811			18CT19	
		201816			18CT27	
		201818			18CT32	
		201821			18DT04	
		201828			18DT29	
		201831			18ET21	
		201832			18ET36	
		201836			18FT03	
		201841			18FT07	
		201842			18FT30	
	201852	18FT40				
	191658 - 000100	17KT09			18FT45	
		17KT20			18GT07	
		17KT24			18GT15	
		17LT18			18GT21	
		17LT19			18GT30	
		18AT29			18HT14	
		18DT24			18HT21	
		18FT27			18HT26	
		18FT42			18HT34	
		18FT44			18IT05	
		18GT14			18IT24	
		18GT28			18JG07	
		18HT02			18JG28	
		18HT16			18JG29	
		18HT20			18JT05	
		18IT01			18JT11	
		18IT14			18KG06	
		18IT19			18KG20	
		18IT27			18KG31	
		18JT14			18KG32	
		18KT02			18KG42	
		18KT10			18KT06	
		18LT12			18LG10	
	18LT17	18LG20				
	19AT01	18LG32				
	19AT03	18LG35				
	191658 - 000150	17KT08			18LG36	
		17KT15			18LT21	
		17LT07			19AG06	
		17LT11			191015 - 000150	201826
		17LT21				17KT03
18DT24		17KT10				
18FT37		17KT17				
18GT24		17KT25				
18KT02		17LT05				
18KT24		17LT12				
18LT08	17LT22					
18LT26	17LT31					
17LT10	18AT05					
191659 - 000150	18BT04	18AT10				
	18FT36	18AT11				
	18IT07	18AT18				
191771 - 518150	201820	18AT27				
	201822	18BG09				
	201825	18BT02				
	201826	18BT07				
	201828	18BT13				
	201836	18BT20				
	201837	18CT03				
	201841	18CT12				
	201901	18CT19				
	201902	18CT27				
	RUSCH Katheter Koppelstuk	191010 - 000100	201821	18CT32		
		191010 - 000150	201745	18DT13		
201748			18DT14			



Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer
RUSCH Katheter Koppelstuk	191010 - 000150	201802	RUSCH Katheter Koppelstuk	191015 - 000150	18DT17
		201805			18DT21
		201806			18DT29
		201808			18DT30
		201809			18ET04
		201811			18ET14
		201812			18ET21
		201816			18ET27
		201828			18ET36
		201831			18FT03
		201832			18FT19
		201837			18FT23
		201839			18FT25
		201842			18FT30
		201844			18FT40
		201846			18FT45
	191010 - 000200	201803			18FT49
	191010 - T00150	201805			18GT15
		201810			18GT21
		201842			18GT30
	191011 - 000050	17KT10			18HT06
		17KT17			18HT14
		17KT25			18HT21
		17LT05			18HT26
		17LT12			18HT34
		17LT22			18IT05
		18AT18			18IT11
		18BT07			18IT17
		18BT20			18IT24
		18CT03			18JG28
		18DT13			18JT05
		18DT29			18JT11
		18ET37			18KG06
		18FT25			18KG12
		18GT07			18KG20
		18GT15			18KG31
		18GT21			18KG32
		18HT06			18KG42
		18HT14			18LG20
		18HT21			18LG32
		18IT05			18LG36
		18IT17			19AG06
		18LG32			19AG16
191011 - 000100		17KT10	191015 - 000200	17KT03	
		17KT17		17KT10	
		17KT25		17KT17	
	17LT05	17KT25			
	17LT12	17LT05			
	17LT22	17LT12			
	17LT31	17LT38			
	18AT11	18AT11			
	18AT18	18AT18			
	18AT18	18AT27			
	18BG09	18BG09			
	18BT07	18BT02			
	18BT13	18BT07			
	18CT12	18CT27			
	18CT19	18DT13			
	18CT32	18DT21			
	18DT04	18DT29			
	18DT13	18ET04			
	18DT29	18ET14			
	18ET21	18ET21			
	18ET36	18ET27			
	18FT19	18ET36			
	18FT25	18FT03			
	18FT45	18FT30			
	18GT04	18FT40			
	18GT07	18FT49			

Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	
RUSCH Katheter Koppelstuk	191011 - 000100	18GT15	RUSCH Katheter Koppelstuk	191015 - 000200	18GT04	
		18GT21			18HT26	
		18GT30			18HT34	
		18HT06			18IT11	
		18HT14			18IT17	
		18HT21			18JG29	
		18HT26			18KG06	
		18HT34			18KG12	
		18IT05			19AG16	
		18IT17			19AG28	
		18IT24			191015 - T00150	17KT10
		18JG28				17KT17
		18JG29				17LT12
		18JT05				18AT18
		18JT11				18BT07
		18KG06				18DT13
		18KG12				18FT25
		18KG20				18FT45
		18KG42				18HT21
		18LG10		18HT34		
		18LG35		18IT11		
		18LG36		18IT24		
		18LT21		18KG31		
		19AG06		18KG32		
		19AG16		18LG10		
		191011 - 000150		17KT03	18LG20	
				17KT10	18LG35	
				17KT17	19AG06	
				17KT25	19AG16	
				17LT05	19AT06	
				17LT12	191033 - 000000	17KT03
				17LT22		17KT10
				18AT05		17KT25
				18AT27		17LT05
				18BG09		17LT22
				18BT02		17LT31
				18BT07		17LT38
18BT13	18AT05					
18CT12	18BT02					
18CT19	18BT07					
18CT27	18BT13					
18CT32	18BT20					
18DT13	18CT03					
18ET04	18CT12					
18ET14	18CT19					
18ET36	18CT27					
18ET37	18ET14					
18FT19	18ET21					
18FT25	18ET36					
18FT30	18FT19					
18FT45	18FT30					
18GT04	18FT40					
18GT07	18FT45					
18GT15	18GT04					
18GT21	18GT07					
18GT28	18GT15					
18GT30	18GT21					
18HT06	18GT30					
18HT14	18HT06					
18HT21	18HT14					
18HT26	18HT21					
18HT34	18HT26					
18IT05	18IT05					
18IT17	18IT24					
18IT24	18JG28					
18JG28	18JT05					
18JG29	18KG12					
18JT05	18LG20					
18JT11	18LG36					
	19AG06					

Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	
RUSCH Katheter Koppelstuk	191011 - 000150	18KG06	RUSCH Katheter Koppelstuk	191034 - 000000	201744	
		18KG12			201750	
		18KG31			201751	
		18KG32			201803	
		18LG10			201805	
		18LG32			201808	
		18LG36			201819	
	19AG06	201820				
	191011 - 000200	17KT03			201822	
		17KT17			201825	
		17LT05			201826	
		17LT12			201828	
		18AT11			201829	
		18AT18			201832	
		18AT27			201839	
		18BT07			201840	
		18CT12			201842	
		18CT19			201844	
		18DT04			201846	
		18DT13			191036 - 000000	201744
		18DT29				201745
		18ET37				201750
		18FT03				201751
		18FT07				201752
		18FT19				201801
	18GT07	201806				
	18GT15	201807				
	18GT21	201808				
	18JG29	201809				
	18JT05	201810				
	18KG06	201812				
	18KG12	201817				
	18KG31	201818				
	18LG10	201819				
	191011 - 000300	17KT25		201820		
		17LT22		201821		
		18AT05		201822		
		18AT27		201823		
		18BG09		201826		
		18DT14		201827		
		18DT17		201828		
18FT07		201829				
18HT14		201830				
18IT17		201831				
18IT24		201832				
18JG28		201834				
18JT11		201836				
18KG06	201840					
18KG31	201848					
191013 - 000150	18HT26	191037 - 000000	17KT03			
	18JG28		17KT10			
191013 - 000200	18AT27	17KT25				
	18BT13	17LT05				
	18ET04	17LT22				
	18FT03	17LT31				
	18GT04	18BT02				
	18GT07	18BT07				
	18GT30	18BT13				
	18JG28	18CT12				
18JT11	18CT32					
18KG31	18ET21					
191013 - 000250	18BG09	18ET36				
	18CT27	18FT03				
	18FT03	18FT19				
	18GT04	18FT25				
	18HT06	18FT30				
191013 - 000300	18KG31	18FT45				
	201746	18GT04				
191014 - 000100	201747	18GT21				

EIF-000353 - Bijlage 4

Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer
RUSCH Katheter Koppelstuk	191014 - 000100	201748	RUSCH Katheter Koppelstuk	191037 - 000000	18HT26
		201750			18IT11
		201806			18IT24
		201807			18JG07
		201808			18JG28
		201810			18JG29
		201816			18JT11
		201820			18KG12
		201822			18KG20
		201825			18KG42
		201828			18LG10
		201834			18LG20
		201836			18LG32
		201839			18LG35
		201841			18LG36
	201843	19AG16			
	201844	191727 - 000150		201744	
	201846			201745	
	201848			201747	
	191014 - 000150			201747	201748
				201748	201749
				201749	201801
				201752	201802
				201801	201803
				201802	201805
				201803	201810
				201804	201811
				201805	201814
				201806	201815
				201810	201816
201811			201818		
201814		201820			
201815		201821			
201816		201822			
201817	201825				
201818	201826				
201819	201827				
201820	201828				
201821	201829				
201822	201830				
201825	201831				
201826	201832				
201827	201834				
201829	201835				
201830	201836				
201831	201838				
201834	201839				
201835	201841				
201836	201842				
201837	201844				
201841	201846				
201842	201848				
201843	201851				
201845	201852				
201846	191727 - 000200	201745			
201847		201747			
201848		201802			
191014 - 000200		201805			
		201810			
	201811				
	201815				
	201820				
201806	201821				
201810	201823				
201811	201826				
201815	201828				
201816	201841				
201817	RUSCH Connectoren Bulk voor ademhalingscircuits	191569 - 000000	201841		
201822	RUSCH Connectoren voor ademhalingscircuits	191525 - 000000	201743		
			201752		

EIF-000353 - Bijlage 4

Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer	Productnaam	Productcode	Lot/Partijnummer
RUSCH Katheter Koppelstuk	191014 - 000200	201823	RUSCH Connectoren voor ademhalingscircuits	191525 - 000000	201815
		201825			201816
		201828			201818
		201847			201819
		201848			201820
		201849			201821
		201850			201823
		201852			201826
	201902	201827			
	191014 - T00150	201745			201828
		201746			201833
		201747			201840
		201748		201844	
		201749		191526 - 000000	17KT17
		201801			17LT05
		201811			17LT12
		201815			17LT22
		201825			17LT38
		201826			18AT05
		201827			18AT11
		201828			18BT02
		201829			18CT12
		201830			18DT29
		201831			18ET04
		201834			18ET21
		201836			18ET27
		201837			18FT30
		201840			18FT49
		201847		18GT15	
		201851		18GT21	
		201852		18GT30	
		191015 - 000050		18HT06	18HT14
	18HT34			18JG29	
	18IT11			18JT11	
	191015 - 000100	17KT10		18KG12	
		17KT17		18KG20	
		17KT25		18KG31	
		17LT12		18KG32	
		17LT22		18LG10	
		17LT31		18LG20	
		18AT12		19AG16	
		18AT18		191527 - 000000	201745
		18AT27			201746
		18BG09			201747
		18BT02			201751
		18BT07			201752