

Product Update: NI-C311 Hybrid Knee Vervanging proximaal aansluit onderdeel

Assistive products department, Accessibility Innovations Company,
Nabtesco Corporation


Geachte Hybrid Knie Gebruikers,

Met deze briefbrengen wij gaarne een potentieel probleem met uw prothese kniescharnier, de Hybrid Knie, onder uw aandacht en wat u kunt doen om dit op te lossen.

;- Wat is het probleem?

In een specifieke productie serie komt een mogelijke montagefout voor van de proximale aansluit onderdeel (de piramide).

Als gevolg van deze fout kan de piramide, die gemonteerd wordt op uw prothesekoker, los komen en in het ergste geval kunnen de onderdelen breken.

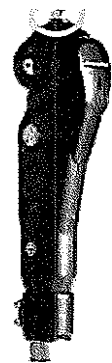

Product Model]: NI-C311 Hybrid Knie (uitsluitend model met "piramide" aansluiting)

Relevant serienummer van de producten;
Vanaf CF15139 tot CF18121

*Door Nabtesco aan de distributeur geleverd tussen Maart 2014 en September 2015.

;- Wat moet u doen?

Graag contact opnemen met het orthopedisch bedrijf, die uw prothese geleverd heeft, om het relevante onderdeel te vervangen door het juiste onderdeel. Onze lokale distributeur kan een leen-knie voor u voorzien gedurende deze update.

:::- Wat moet u doen als u de fout uit dit bericht bemerkt?

Als u speling voelt of geluid rond de knie-as, moet u zo spoedig mogelijk contact met uw orthopedisch bedrijf opnemen.

Het orthopedisch bedrijf en/of de distributeur zullen nagaan of het kniescharnier geüpdate moet worden en zullen het onderdeel vervangen door het juiste nieuwe onderdeel.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze product-update u kan geven. Ons doel is om er zeker van te zijn dat uw knie zo betrouwbaar mogelijk blijft functioneren.

Met vriendelijke groet,

Nabtesco Corporation
Assistive Products Department

Nabtesco

Assistive Products Department

35, Uozakihamacho, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024 Japan

Phone +81 78 413 2724 Fax +81 78 413 2725

BEVESTIGING VAN ONTVANGST TERUGROEP ACTIE

Dit formulier is ook bedoeld om te bevestigen dat u de informatie naar behoren ontvangen heeft en dat u dit do01-gestuurd heeft aan uw cliënten. Bij voorbaat dank om dit bericht te retourneren pe, fax: +31.30.2711045 of per email: sales@lothfabenim.nl

Ik bevestig dat ik de informatie over de NI-C311 terugroepactie ontvangen heb en hier notitie van heb genomen.

Datum \7-/0li J)0\Ci

