


OPTIES VOOR HET TEGENGAAN VAN MIGRATIES VAN PERCUTANE EXTENSIECONNECTOREN

Medtronic

De volgende instructies bevatten richtlijnen over het tegengaan van verschuiving, tijdens de testfase, van de percutane extensieconnector in het tunneltraject langs de geleidingsdraad.


Oplossing 1:

1. Maak een extra lus en hecht deze aan de percutane connector en de percutane geleidingsdraad met een 2-0 of kleinere niet-absorbeerbare hechting (afbeelding 1)

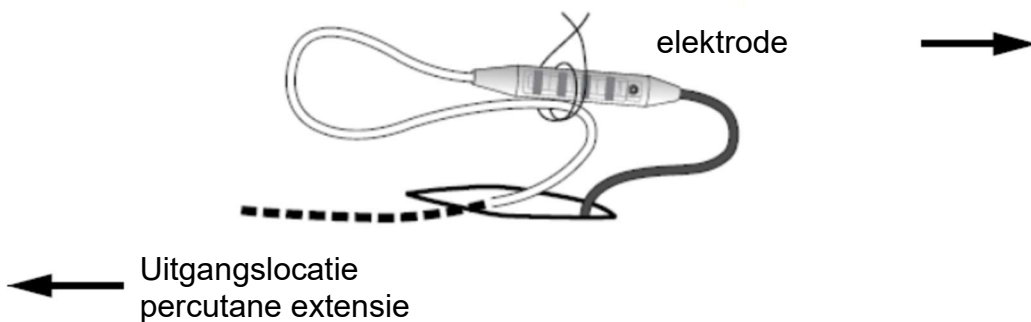


Afbeelding 1. Hechting twee keer rond de percutane extensieconnector en de lus van de geleidingsdraad

2. Span de hechting aan rond de percutane extensieconnector en de geleidingsdraad en knoop ze goed vast (afbeelding 2)

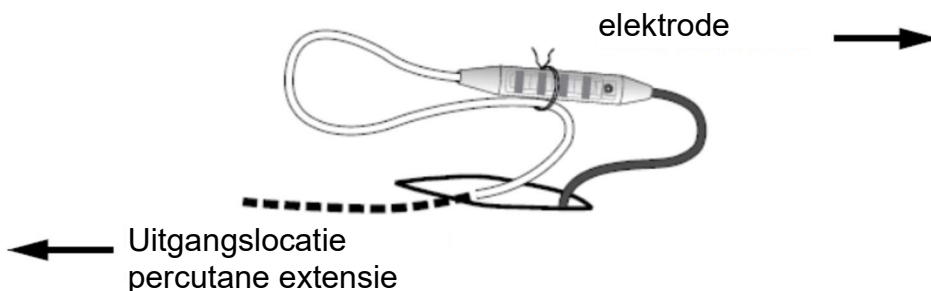


Afbeelding 2. Hechting vastgemaakt en -geknoopt rond de percutane extensieconnector en de geleidingsdraad.

3. Creëer een subcutane pocket boven of onder de incisie die loodrecht staat op het tunneltraject van de percutane extensie om er de percutane extensieconnector en de gemaakte lussen in te plaatsen (afb. 3 en 4).

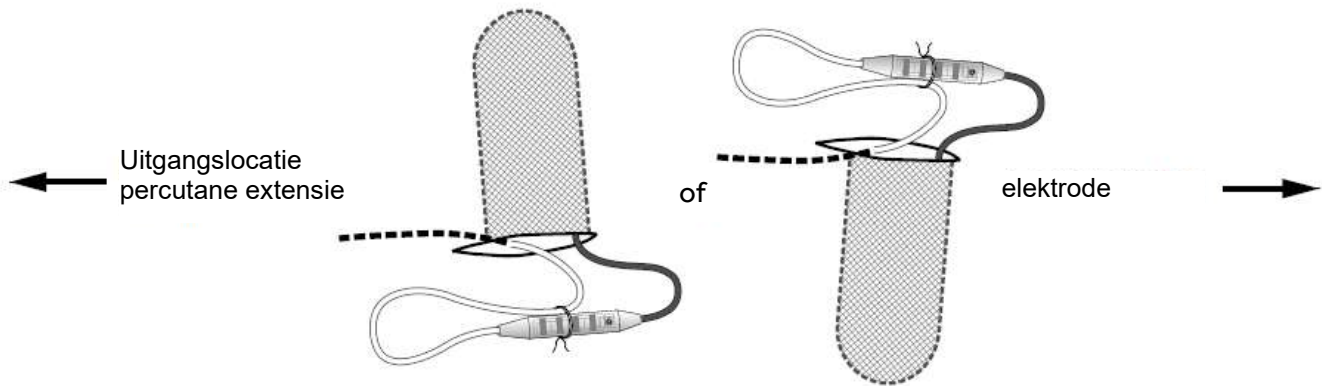


Afbeelding 3. Uitvergroete afbeelding van de subcutane pocket boven en onder de incisie voor de percutane extensie en de gemaakte lussen.

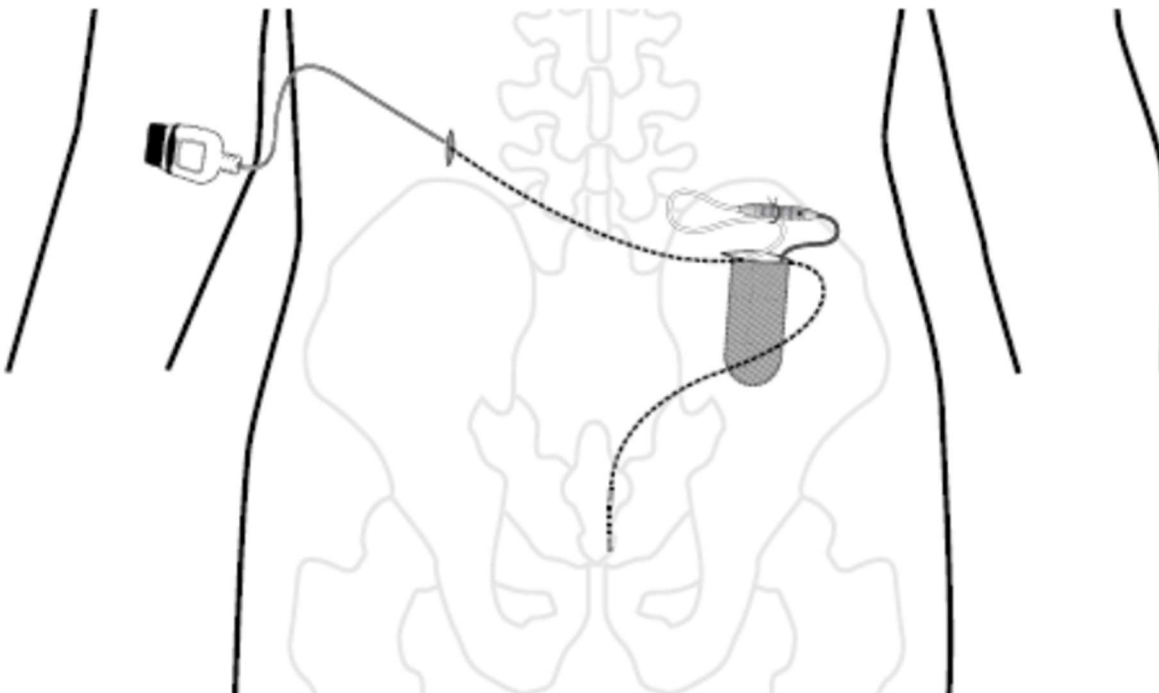


Afbeelding 4. Subcutane pocket onder de incisie voor de percutane extensie en de gemaakte lussen.

4. Draai de percutane extensieconnector zo dat het zetschroefblok en de elektrode naar beneden zijn gericht en breng de percutane extensieconnector en de geleidingsdraad in de pocket in (afbeelding 5a en 5b).

Opmerking. Positioneer de geleidingsdraad en extensie en zorg dat u scherpe bochten en knikken vermijdt. Controle met fluoroscopie is mogelijk vereist.

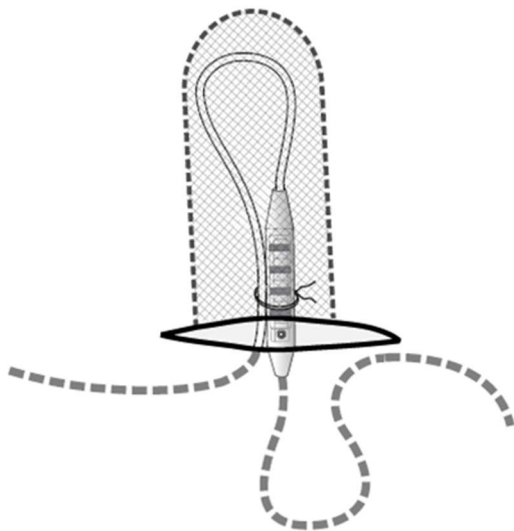

5a

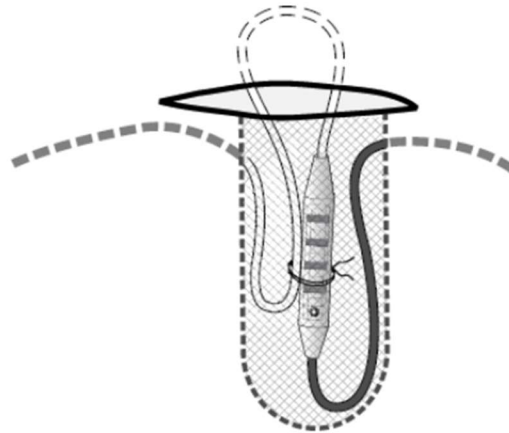

5b

Afbeelding 5a toont de pocket boven de incisie. **Afbeelding 5b** toont de pocket onder de incisie.

Vorbereiden op implantatie neurostimulator na de beoordelingsperiode


1. Leg de locatie van de percutane extensieconnector voorzichtig open en leg de geleidingsdraad en connector bloot.
2. Schroef de zetschroef in de connector los met de torsieschroevendraaier door linksom te draaien.
3. Verwijder de geleidingsdraad voorzichtig van het uiteinde van de connector van de percutane extensie.



Let op: Als u weerstand voelt, wanneer u de elektrode van de percutane extensie verwijdert, maakt u de zetschroef lichtjes los om zo de elektrodepunten los te maken. Zorg ervoor dat u de zetschroef zelf niet losmaakt.

Controleer de elektrodepunten op beschadiging (afvlakken of uitrekken van de geleidingsdraad) als u bij het verwijderen weerstand hebt gevoeld. Schade aan de geleidingsdraad zou tot bijkomende chirurgische stappen kunnen leiden.

- Knip de percutane extensie door in de buurt van de incisie, proximaal van waar ze aan de connector is vastgemaakt (afbeelding 6).

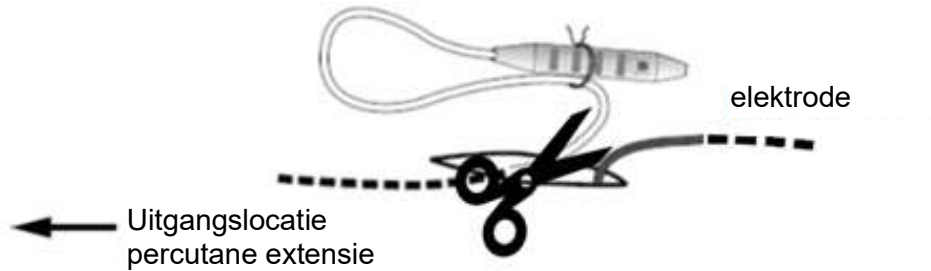

Afbeelding 6. Deze afbeelding geeft aan waar u de percutane extensie moet doorknippen om het te verwijderen

- Verwijder het resterende gedeelte van de percutane extensie via de contralaterale uitgangsllocatie en gooi dit weg.




Waarschuwing: Zorg ervoor dat het steriele veld tijdens verwijdering van de percutane extensie in stand wordt gehouden om het risico op infectie te beperken.

- Sluit de uitgangsllocatie en ga verder met het aansluiten van de elektrode op de neurostimulator. Raadpleeg de producthandleiding die bij de neurostimulator is verpakt.

Oplossing 2:

- Zodra de tunnelaar op zijn plaats zit en voordat u de percutane extensie naar de locatie van de pocket trekt, plaatst u een oplosbare hechting in het weefsel rond de tunnelaar in de buurt van de insteeklocatie van de pocket (afbeelding 1).

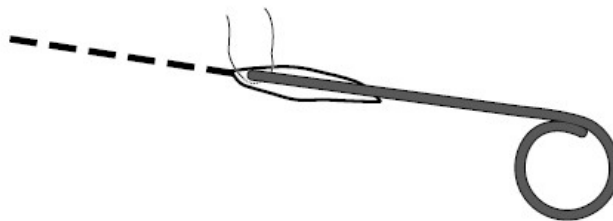


Afbeelding 1. Hechting geplaatst rond de tunnelaar in het subcutane weefsel

Opmerking: neem het oppervlakkige bindweefsel mee bij het plaatsen van de hechtdraad in het weefsel rond de tunnelaar

- Trek de tunnelaar terug om het uiteinde van de extensieconnector via de uitgangsllocatie die gecreëerd is voor de percutane extensie naar de locatie in de pocket te trekken.
- Verwijder de extensieconnector uit het draagbakje.

4. Maak de vooraf geplaatste hechting vast in het weefsel rond de percutane extensie om het tunneltraject te sluiten (afbeelding 2).

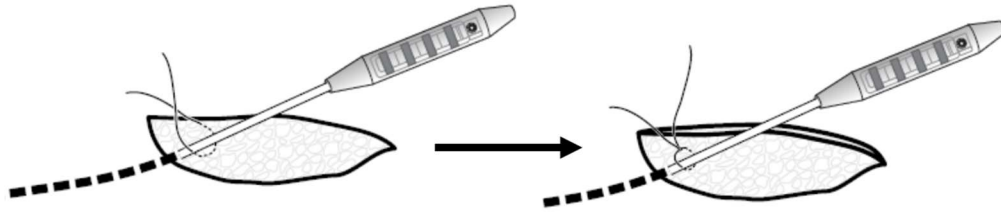

Afbeelding 2. Het vastmaken van de hechting rond de percutane extensie

Opmerking: Span de hechting niet te vast aan om te vermijden dat u de extensiedraad samendrukt.

5. Raadpleeg de handleiding voor verdere implantatie van de elektrode om het proces af te ronden.