

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Steriele blades* voor eenmalig gebruik
Recall

September 2021

Medtronic-referentienr: FA987

Geachte zorgverlener,

Het doel van deze brief is u ervan op de hoogte te stellen dat Medtronic vrijwillig specifieke lotnummers van steriele blades voor eenmalig gebruik terugroept. Genavigeerde (EM) blades worden gebruikt om de nauwkeurigheid tijdens de procedure te bevorderen. Indien er speling optreedt in de blades vermindert dat de nauwkeurigheid en precisie. Een volledige lijst van de betrokken producten is opgenomen in Bijlage A.

Het steriele blade is een accessoire-onderdeel voor eenmalig gebruik van de handstukken van de StraightShot M-serie, die integraal deel uitmaken van de XPS- en IPC-systemen.

Beschrijving van het probleem:

Tot 1 augustus 2021 heeft Medtronic 120 productklachten ontvangen in verband met tipbreuken en optreden van speling/trillen in deze subgroep van producten.

Bij geen van de 51 klachten over speling en trillen werden gevolgen of patiëntletsel gemeld. Van de 69 klachten over breuk/tipbreuk, vermeldden 2 dat interventieradiologie nodig was om te bevestigen dat er geen fragmenten waren achtergebleven, 1 vermeldde een kleine vertraging van de procedure en interventieradiologie, 1 vermeldde dat een endoscoop en een tang werden gebruikt om de fragmenten te verwijderen, en 1 vermeldde dat fragmenten van het hulpmiddel in de patiënt achterbleven. Bij de overige 64 klachten werden geen gevolgen voor de patiënt vermeld.

Tipbreuken of losrakende fragmenten kunnen schade toebrengen aan de patiënt, zuurstofgebrek of een reactie van een vreemd lichaam veroorzaken als het fragment in de luchtweg van de patiënt zou migreren, of niet terug te halen is. Er bestaat ook een kans dat de tip kritische weefselstructuren zoals zenuwen en bloedvaten raakt. Speling / trillen van een blade kan ook tot blijvende schade leiden als een blade daardoor kritische weefselstructuren beschadigt.

Wat te doen:

- Identificeer alle ongebruikte betrokken Medtronic-blades die in Bijlage A vermeld staan en plaats ze in quarantaine.
In Bijlage B vindt u een voorbeeld van het etiket aan de buitenzijde van de verpakking waarop het "artikelnummer" (CFN) en het lotnummer vermeld staan.
- Retourneer alle ongebruikte betrokken producten aan Medtronic. Uw Medtronic-vertegenwoordiger zal u helpen bij de terugzending en vervanging van dit product, indien nodig.
- Deze kennisgeving moet worden gecommuniceerd aan iedereen binnen uw instelling die op de hoogte moet zijn van dit probleem, en elke instelling waar de mogelijke hulpmiddelen in kwestie naar zijn overgebracht.
- Bewaar a.u.b. een kopie van deze kennisgeving in uw administratie (indien van toepassing).

***Onder Blades wordt verstaan: de opzetstukken voor het Medtronic Shaver Systeem**

Medtronic heeft de bevoegde autoriteit in uw land (IGJ) van deze actie op de hoogte gesteld.

Onze excuses voor het ongemak dat hierdoor kan zijn veroorzaakt. De veiligheid van de patiënt staat bij ons voorop en we waarderen uw snelle afhandeling van deze zaak. Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw contactpersoon of met Medtronic Trading NL B.V. op telefoonnummer: 040-7117555.

Met vriendelijke groet,

...

...

Sr. Regulatory Affairs Specialist

**LET'S TAKE HEALTHCARE
FURTHER, TOGETHER**

Bijlage A: Scope

Tabel 1: Draaibare gekartelde blades (1882902HRE).....	4
Tabel 2: Draaibare Silver Bullet-blades (1882905HRE).....	4
Tabel 3: Niet-draaibare RAD60 gebogen blades (1882916).....	4
Tabel 4: Draaibare Skimmer-blades (1882924HRE).....	4
Tabel 5: Niet-draaibare gekartelde blades (1882936E).....	5
Tabel 6: Niet-draaibare gekartelde blades (1882937E).....	5
Tabel 7: Draaibare Skimmer-blades (1882979HRE).....	5
Tabel 8: Draaibare, traceerbare Quadcut-blades (1883080EM).....	5
Tabel 9: Draaibare Quadcut-blades (1883080HRE).....	5
Tabel 10: Draaibare, traceerbare Quadcut-blades (1883480EM).....	5
Tabel 11: Draaibare Quadcut-blades (1883480HRE).....	6
Tabel 12: Draaibare gekartelde blades (1883502HRE).....	6
Tabel 13: Draaibare RAD40-blades (1883506HRE).....	6
Tabel 14: Draaibare RAD12-blades (1883512HRE).....	6
Tabel 15: Niet-draaibare RAD12-blades (1883514).....	6
Tabel 16: Draaibare RAD60-blades (1883516HRE).....	7
Tabel 17: Draaibare Silver Bullet-blades (1884005HRE).....	7
Tabel 18: Draaibare RAD40-traceerblades (1884006EM).....	7
Tabel 19: Draaibaar RAD12-traceerblade (1884012EM).....	8
Tabel 20: Niet-draaibare tonsillectomieblades (1884013).....	8
Tabel 21: Niet-draaibare RAD-luchtweglarynxblades (1884020).....	8
Tabel 22: Draaibare Tricut-blades (1884030HRE).....	8
Tabel 23: Draaibare Tricut-blades (1884031HRE).....	8
Tabel 24: Niet-draaibare tracheaalblades (1884032).....	9
Tabel 25: Niet-draaibare tracheaalblades (1884033).....	9
Tabel 26: Draaibare Tricut-blades (1884033HRE).....	9
Tabel 27: Draaibare, traceerbare Tricut-blades (1884080EM).....	10
Tabel 28: Draaibare, traceerbare Quadcut-blades (1884380EM).....	11
Tabel 29: Draaibaar Quadcut-blade (1884380HR).....	11
Tabel 30: Draaibaar Quadcut-blade (1884380HRE).....	12
Tabel 31: Wervelkolomblades (40A2500).....	13
Tabel 32: Wervelkolomblades (40R2000).....	13
Tabel 33: Wervelkolomblades (40R2500).....	13
Tabel 34: Wervelkolomblades (40S2000).....	13
Tabel 35: Wervelkolomblades (40S2500).....	13
Tabel 36: Wervelkolomblades (45A2000).....	13
Tabel 37: Wervelkolomblades (45A2500).....	14
Tabel 38: Wervelkolomblades (45R2000).....	14
Tabel 39: Wervelkolomblades (45R2500).....	14
Tabel 40: Wervelkolomblades (45S2000).....	14
Tabel 41: Wervelkolomblades (45S2500).....	14

Tabel 1: Draaibare gekartelde blades (1882902HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
2.9mm Serrated Blade	00763000036720	1882902HRE	0217969607, 0218283720, 0218283721, 0219215912, 0219435041, 0221527810, 0221969518

Tabel 2: Draaibare Silver Bullet-blades (1882905HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
2.9mm Silver Bullet Blade	00763000036782	1882905HRE	0217968718, 0217968718, 0217968719, 0218283717, 0218283719, 0218356097, 0218790225, 0219215913, 0220177024, 0220659109, 0220659110, 0220878176, 0221091604, 0221091605, 0221118614, 0221258284, 0221527812, 0221611654

Tabel 3: Niet-draaibare RAD 60 gebogen blades (1882916)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
RAD 60 SINUS BLADE,2.9MM 3/BX	20763000041223	1882916	0217968715, 0218283722, 0218283942, 0218356873, 0218356874, 0218356875, 0218623544, 0219369113, 0219501397, 0219700166, 0220118673, 0220659645, 0220784922, 0220826101, 0220826102, 0221020300, 0221118606, 0221118607, 0221118608, 0221198946, 0221198951, 0221198952, 0221430166, 0221489935, 0221611652, 0221791819, 0221791821

Tabel 4: Draaibare Skimmer-blades (1882924HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
SKIMMER Blade 22CM 2.9MM M4	00763000036744	1882924HRE	0220057236, 0220057237, 0220057238, 0220057239, 0220057241, 0220057242, 0220057243, 0220057244, 0220560777, 0220659671, 0220878169, 0221072336, 0221156836, 0221275006, 0221611653, 0221619324, 0221791822

Tabel 5: Niet-draaibare gekartelde blades (1882936E)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
ANG TIP SERRATED, 18CMX2.9MM	00763000036799	1882936E	0218377217, 0219660525

Tabel 6: Niet-draaibare gekartelde blades (1882937E)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
ANG TIP SERRATED, 22CMX2.9MM	00763000036805	1882937E	0218377221, 0219661147, 0221279640

Tabel 7: Draaibare Skimmer-blades (1882979HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
2.9 mm Skimmer® Angle-Tip Blade	00763000033552	1882979HRE	0217970486, 0217970490, 0218162629, 0218547894

Tabel 8: Draaibare, traceerbare Quadcut-blades (1883080EM)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Trackable Quadcut Blade 3.0mm	00763000034009	1883080EM	0217668426, 0217668430, 0217668431, 0218547904, 0219386765, 0219387546, 0221279639, 0221597049

Tabel 9: Draaibare Quadcut-blades (1883080HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
3.0mm Quadcut Blade	00763000033989	1883080HRE	0217261083, 0217261084, 0217261085, 0218354891, 0218421177, 0218790160, 0219036457

Tabel 10: Draaibare, traceerbare Quadcut-blades (1883480EM)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Trackable Quadcut Blade 3.4mm	00763000034016	1883480EM	0218355352, 0218355353, 0218355354, 0218548106, 0218975242, 0218975243, 0219488206, 0219810719, 0221111103, 0221275012, 0221367934, 0221597050, 0221791924

Tabel 11: Draaibare Quadcut-blades (1883480HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
3.4mm Quadcut Blade	00763000033996	1883480HRE	0218354892, 0218547901, 0218790209, 0219434900, 0219501394, 0219859948, 0220070443, 0220073722, 0220118769, 0220659679, 0220929475, 0220929476, 0220929477, 0221115259, 0221170624, 0221275017, 0221359897, 0221477053, 0221599106, 0221603991, 0221792015, 0222007858

Tabel 12: Draaibare gekartelde blades (1883502HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
3.5mm Serrated Blade	00763000036713	1883502HRE	0217666178, 0217666179, 0218356088, 0218356089, 0218790221, 0219215911, 0219435040, 0220929595, 0221072335, 0221110715, 0221110717, 0221118531, 0221182357, 0221468015

Tabel 13: Draaibare RAD 40-blades (1883506HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Rad 3.5mm 40 deg blade	00763000037376	1883506HRE	0217666180, 0217666181, 0217667208, 0218356103, 0218790743, 0219728474, 0220070439, 0220118669, 0220158600, 0220484568, 0221119048, 0221258278, 0221468019, 0221611257, 0221611258

Tabel 14: Draaibare RAD 12-blades (1883512HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Rad 3.5mm 12 deg blade	00763000037369	1883512HRE	0218356098, 0218356099, 0218356100

Tabel 15: Niet-draaibare RAD 12-blades (1883514)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
RAD12 BLADE,3.5MM 5/BX	20763000040967	1883514	0218283532, 0218791333, 0219215919

Tabel 16: Draaibare RAD 60-blades (1883516HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Rad 3.5mm 60 deg blade	00763000037383	1883516HRE	0217665427, 0217665428, 0217665429, 0217666173, 0217666174, 0217666175, 0217666176, 0217666177, 0218572169, 0219699597, 0219728468, 0219728469, 0219848777, 0219848778, 0219848779, 0219859949, 0220124591, 0220124592, 0220124593, 0220266094, 0220313525, 0220313606, 0220313607, 0220313608, 0220313609, 0220313610, 0220313611, 0220313612, 0220484569, 0220484570, 0220891745, 0220892206, 0221111087, 0221111089, 0221111092, 0221111093, 0221118545, 0221261887, 0221271501, 0221279626, 0221279627, 0221477061, 0221477062, 0221477063, 0221477064, 0221611647, 0221611648, 0221611649, 0221791908, 0221791910, 0221791911

Tabel 17: Draaibare Silver Bullet-blades (1884005HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
4.0mm Silver Bullet Blade	00763000036737	1884005HRE	0217968722, 0218161789, 0218161790, 0218356090, 0218790222

Tabel 18: Draaibare RAD 40-traceerblades (1884006EM)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Trackable Rad 4.0mm 40 deg blade	00763000043254	1884006EM	0217260953, 0217260954, 0217260955, 0217260956, 0217260957, 0217260958, 0217260959, 0217969622, 0217969623, 0217969624, 0217969625, 0217970026, 0217970027, 0218162408, 0218162409, 0218282135, 0218282136, 0218282139, 0218311142, 0218311143, 0218311144, 0218311145, 0218356286, 0218356287, 0218356288, 0218356289, 0218356290, 0218356291, 0218356292, 0218975837, 0219215914, 0219215915, 0219215916, 0219715476, 0219715477, 0219811260, 0220659888, 0220804521, 0220826103, 0220878167, 0220878168, 0220929588, 0220996074, 0221199850, 0221367938, 0221477065, 0221477146, 0221586895, 0221618118, 0221791912, 0222046728, 0222046729

Tabel 19: Draaibaar RAD 12-traceerblade (1884012EM)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Trackable Rad 4.0mm 12 deg blade	00763000043247	1884012EM	0217667211, 0217667212, 0217667213, 0217667214, 0217667215, 0217667216, 0218159075, 0218159076, 0218159077, 0218159452, 0218159453, 0218159455, 0218159456, 0218159457, 0218159458, 0218423331, 0218975832, 0219036454, 0219036455, 0219122536, 0219122537, 0221791915

Tabel 20: Niet-draaibare tonsillectomieblades (1884013)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
TONSILLECTOMY Blade 4MM	20763000041230	1884013	0217969616, 0217969617, 0218283944, 0218572177, 0219010745, 0219110914, 0221170726, 0221603993, 0221783424, 0221791809

Tabel 21: Niet-draaibare RAD-luchtweglarynxblades (1884020)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
RAD AIRWAY LARYNGEAL BLADE	20763000040301	1884020	0219501396, 0220648062, 0220649166, 0220892207, 0221156835, 0221271500

Tabel 22: Draaibare Tricut-blades (1884030HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Tricut Blade 22CM X 4MM, M4	00763000036751	1884030HRE	0219968104, 0220031839, 0220031841, 0220031842, 0220031843, 0220484572, 0220560783, 0221118618, 0221258283, 0221468017, 0221698794, 0222008093

Tabel 23: Draaibare Tricut-blades (1884031HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Tricut Blade 27CM X 4MM, M4	00763000036768	1884031HRE	0219968105, 0220032167, 0220032168, 0220032169, 0220468850, 0220583927, 0220934514, 0221072334, 0221279641, 0221792010, 0222008095

Tabel 24: Niet-draaibare tracheaalblades (1884032)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
TRACHEAL BLADE,4MM,37CM LENGTH	00763000036140	1884032	0220057395, 0220057397

Tabel 25: Niet-draaibare tracheaalblades (1884033)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
TRACHEAL BLADE,CVD TIP,37CM	00763000036447	1884033	0220057389, 0220057390, 0220057392

Tabel 26: Draaibare Tricut-blades (1884033HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Tricut Blade,37CM X 4MM,M4	00763000036775	1884033HRE	0220057245, 0220057386, 0220057387

Tabel 27: Draaibare, traceerbare Tricut-blades (1884080EM)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Trackable4.0mm TricutBlade	00763000033842	1884080EM	0217258058, 0217258057, 0217258059, 0217258060, 0217258061, 0217258062, 0217258063, 0217922715, 0217922716, 0217968723, 0217968724, 0217968725, 0217969086, 0217969087, 0217969088, 0217969089, 0217969090, 0217969091, 0217969092, 0217969093, 0217969094, 0217969095, 0217969096, 0217969098, 0217969099, 0217969100, 0218351460, 0218351462, 0218351463, 0218351464, 0218351465, 0218354786, 0218354787, 0218354788, 0218354789, 0218496725, 0218569925, 0218572166, 0218572167, 0218577805, 0218578866, 0218578867, 0218578868, 0218761931, 0218761932, 0218761933, 0218761934, 0218761935, 0218761936, 0218772873, 0218795848, 0218795849, 0218795850, 0218795851, 0218962903, 0218972892, 0218972893, 0218972894, 0218972895, 0218972896, 0219090839, 0219180699, 0219214780, 0219214781, 0219214782, 0219214783, 0219214784, 0219434676, 0219488207, 0219745076, 0220804698, 0220929480, 0220929481, 0220929482, 0220929483, 0221091281, 0221111100, 0221279635, 0221430167, 0221476225, 0221477046, 0221477047, 0221477048, 0221477049, 0221477051, 0221619326, 0221619330, 0221619331, 0221619332, 0221619333, 0221619334, 0221784366, 0221786297, 0221791918, 0221805157, 0221805158, 0221824122, 0221824123, 0222196973

Tabel 28: Draaibare, traceerbare Quadcut-blades (1884380EM)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
Trackable Quadcut Blade 4.3mm	00763000034023	1884380EM	0217258064, 0217258065, 0217260946, 0217260947, 0217260948, 0217260949, 0217260950, 0217260951, 0217260952, 0217262726, 0218179453, 0218348413, 0218355677, 0218355678, 0218355679, 0218355680, 0218355681, 0218355682, 0218355683, 0218355684, 0218355685, 0218422557, 0218422558, 0218496125, 0218497688, 0218497689, 0218497690, 0218572168, 0218683395, 0218683396, 0218683397, 0218683398, 0218795858, 0218795859, 0218795860, 0218975828, 0218975829, 0218975830, 0219215906, 0219215907, 0219215908, 0219215910, 0219653288, 0219653289, 0219802564, 0219834731, 0219848776, 0219854757, 0219890572, 0219890573, 0220484577, 0220484578, 0220659891, 0220659896, 0220703724, 0220703986, 0220703987, 0220703988, 0220703989, 0220878170, 0220878171, 0220878172, 0220878173, 0221072337, 0221110719, 0221110720, 0221118536, 0221118537, 0221118538, 0221118539, 0221181704, 0221182518, 0221271504, 0221278671, 0221279628, 0221279629, 0221305678, 0221319087, 0221468021, 0221477059, 0221477060, 0221489745, 0221489926, 0221611261, 0221616348, 0221619315, 0221619316, 0221619317, 0221619318, 0221792011, 0221805165, 0221805386, 0221805388, 0221824447, 0221824448, 0221824449

Tabel 29: Draaibaar Quadcut-blade (1884380HR)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
4.3mm Quadcut Blade	20763000038162	1884380HR	0217261579, 0217261580, 0217261581, 0217261582, 0217911696, 0217911698, 0217968713, 0218283533, 0218356295, 0218356302, 0218356303, 0218356304, 0218356305, 0218356866, 0218356867, 0218356870, 0218356871, 0218356872, 0218404708, 0218404710, 0218572170, 0218572171, 0218572172, 0218572173, 0218572174, 0218572175, 0218653925, 0218655886, 0218655887, 0218655888, 0218790744, 0218790745, 0218791326,

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
			0218791327, 0218791328, 0218791329, 0218791330, 0218791331, 0218791332, 0219215917, 0219423535, 0219488214, 0219488215, 0219488216, 0219488217, 0219488218, 0219501398, 0219501399, 0219501400, 0219501401, 0219550301, 0219556484, 0219568999, 0219569000, 0219569001, 0219594771, 0219594772, 0219594773, 0219619651, 0219632566, 0219632567, 0219679070, 0219679071, 0219679075, 0219679076, 0219707520, 0219745043, 0219745044, 0219745286, 0219810724, 0219810725, 0219811246, 0219884815, 0219890990, 0220659889, 0220772116, 0220827732, 0220827733, 0220880530, 0220907638, 0220907639, 0220907640, 0220907641, 0220907642, 0220907643, 0220907644, 0221072339, 0221111098, 0221111099, 0221118616, 0221118617, 0221242884, 0221242885, 0221252436, 0221252970, 0221275018, 0221281290, 0221349775, 0221477148, 0221489408, 0221489409, 0221603994, 0221611646, 0221618122, 0221618123, 0221618124, 0221618125, 0221619306, 0221619307, 0221619308, 0221735536, 0221735537, 0221791815, 0221793344, 0221805399, 0221805400, 0221805401, 0221824456, 0221824458, 0222006442, 0222007433, 0222007434, 0222007435, 0222007436

Tabel 30: Draaibaar Quadcut-blade (1884380HRE)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
4.3mm Quadcut Blade	00763000033910	1884380HRE	0217663791, 0217663792, 0217663793, 0217663794, 0217663795, 0217663796, 0218179447, 0218283718, 0218319250, 0218322548, 0219214785, 0219728473, 0220118670, 0220118671, 0221275019, 0221429981, 0221429982, 0221619338, 0221791811, 0221791812

Tabel 31: Wervelkolomblades (40A2500)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
ANGLED Blade 4.0MM NUCLEOTOMY	00763000033835	40A2500	0220002825

Tabel 32: Wervelkolomblades (40R2000)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
NUCLEUS REMOVAL SET 4.0MM	00763000033866	40R2000	0218179458

Tabel 33: Wervelkolomblades (40R2500)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
NUCLEUS REM SET 4.0MM ML	00763000033798	40R2500	0218299192

Tabel 34: Wervelkolomblades (40S2000)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
NUCLEUS REMOVAL Blade 4.0MM	00763000033873	40S2000	0218179459

Tabel 35: Wervelkolomblades (40S2500)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
BLADE STRAIGHT 4.0MM NUCLEOTOMY	00763000043193	40S2500	0220226674

Tabel 36: Wervelkolomblades (45A2000)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
NUCLEUS REMOVAL ANG 4.5MM	00763000033880	45A2000	0220443669

Tabel 37: Wervelkolomblades (45A2500)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
BLADE ANGLED 4.5MM NUCLEOTOMY	00763000043223	45A2500	0218323602

Tabel 38: Wervelkolomblades (45R2000)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
NUCLEUS REMOVAL SET 4.5MM	00763000033897	45R2000	0218284087, 0218292178, 0218973633

Tabel 39: Wervelkolomblades (45R2500)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
NUCLEUS REM SET 4.5MM ML	00763000033811	45R2500	0218297618

Tabel 40: Wervelkolomblades (45S2000)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
BLADE NUCLEUS REMOVAL 4.5MM	00763000033903	45S2000	0218299193

Tabel 41: Wervelkolomblades (45S2500)

Productnamen, Unieke apparaat-id (indien van toepassing)	Global Trade Itemnummer (GTIN)	Artikelnummer (CFN)	Lotnummer
BLADE 4.5MM NUCLEOTOMY	00763000043216	45S2500	0218297619

Bijlage B: Voorbeelden van etikettering

Artikelnummer / CFN →

REF 1884380EM x1
Rotatable Fusion® Blade, Quadcut®, 4.3 mm x 13 cm

Bucholz Freehand®
Made in Dominican Republic

Medtronic
Medtronic Navigation, Inc.
826 Coal Creek Circle
Louisville, CO 80027 USA

Distributed by:
Medtronic Xomed, Inc.
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, FL 32216 USA

STERILE EO ROTATABLE R Only

9999-09-09

(01)0076300034023(17)990909(10)0999999999

LOT 099999999 M980867A001 A 0001

REF 1884380EM x1
Rotatable Fusion® Blade, Quadcut®, 4.3 mm x 13 cm

Lotnr. →

Artikelnummer / CFN →

REF 1884380EM x1
Rotatable Fusion® Blade, Quadcut®, 4.3 mm x 13 cm

Medtronic
Medtronic Navigation, Inc.
826 Coal Creek Circle
Louisville, CO 80027 USA

Distributed by:
Medtronic Xomed, Inc.
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, FL 32216 USA

Bucholz Freehand®

STERILE EO ROTATABLE R Only

9999-09-09

(01)0076300034023(17)990909(10)0999999999

LOT 099999999 M980865A001 A 0001

REF 1884380EM
LOT 099999999
9999-09-09
Medtronic Navigation, Inc.

Lotnr. →