

DRINGEND FIELD SAFETY NOTICE

Power Processor, 3K en 3K HS Stockyard

Geachte Beckman Coulter relatie,

Beckman Coulter initieert een field safety corrective action voor bovenstaand product. Deze brief bevat dan ook belangrijke informatie die uw onmiddellijke aandacht vereist.

VASTSTELLING:	Naar aanleiding van interne onderzoeken hebben we ontdekt dat de spatbescherming die op de track aanwezig hoort te zijn, niet in alle gevallen is geleverd aan de klant. Deze bescherming is vereist voor een veilige werking van het Power Processor systeem.
GEVOLG:	Er kan letsel bij gebruikers optreden als de spatbescherming niet op zijn plaats zit tijdens het gebruik van het systeem.
ACTIE:	<p>Een onderhoudstechnicus van Beckman Coulter Field service zal uw systeem controleren op de spatbescherming. Als de hieronder afgebeelde spatbescherming niet aanwezig is, zal de onderhoudstechnicus deze bestellen en installeren.</p>  <p>Hoewel Beckman Coulter geen meldingen van letsel heeft ontvangen naar aanleiding van de ontbrekende spatbescherming, kan de gebruiker letsel oplopen als de spatbescherming niet op zijn plaats zit tijdens het gebruik van het systeem. Blijf alle veiligheidswaarschuwingen en de informatie over het gebruik van het systeem in de gebruiksaanwijzing van de Power Processor volgen.</p>
OPLOSSING:	Beckman Coulter wil een service modificatie doorvoeren om ervoor te zorgen dat de spatbescherming aan klanten wordt verstrekt.



De bevoegde nationale autoriteit werd geïnformeerd over deze field safety corrective action.

Gelieve deze informatie aan uw laboratoriummedewerkers mee te delen en bewaar deze notificatie in de kwaliteitsdocumentatie van uw laboratorium. Als u het product geleverd hebt aan een ander laboratorium, geef dan een kopie van deze brief aan deze partner.

Vul bijgevoegd antwoordformulier in en stuur ons dit binnen de tien dagen terug zodat we zeker zijn dat u deze belangrijke informatie hebt ontvangen.

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Beckman Coulter.

- Via onze website: <http://www.beckmancoulter.com>
- Telefonisch: neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Beckman Coulter.

We verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak en bedanken u voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

...

Bijgevoegd: antwoordformulier

FA-21046

Beckman Coulter, het gestileerd logo en de hier vermelde product-en servicenamen van Beckman Coulter zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Beckman Coulter, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.