

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING N2 MI-01-2022-FSN

Mobiele patiënten lift Diana II ELA, Diana II MLA, Lifteo ELA, Lifteo MLA

FSCA-identificatie: MI-01-2022- FSCA

Type FSCA: Vervangen van een onderdeel door een geautoriseerd service centrum

15-07-2022

Let op: klanten van Meden-Inmed volgens de distributielijst

De kennisgeving heeft betrekking op de Diana II ELA, Diana II MLA, Lifteo ELA en Lifteo MLA mobiele patiënten liften met in de fabriek geïnstalleerde tweepunts jukken type 2P45.

De liften waarvoor de jukken moet worden vervangen, hebben de volgende serienummers:

Lift type	Serienummer
Diana II ELA	SN-03072-2020
	SN-03071-2020
	SN-03075-2020
	SN-03076-2020
	SN-03077-2020
	SN-03078-2020
	SN-03079-2020
	SN-03080-2020
	SN-03081-2020
	SN-03082-2020
	SN-03083-2020
	SN-03084-2020
	SN-00266-2021
	SN-00267-2021
	SN-00268-2021
	SN-00269-2021
	SN-00278-2021
	SN-00265-2021
Diana II MLA	SN-03056-2020
	SN-03055-2020
	SN-03057-2020
	SN-03058-2020
	SN-03743-2021
	SN-03059-2020
	SN-03744-2021
	SN-03745-2021
	SN-03746-2021
	SN-03747-2021
	SN-03748-2021
	SN-03061-2020
	SN-03749-2021
	SN-03752-2021
SN-03750-2021	
SN-03751-2021	

Lift type	Serienummer
LIFTEO ELA	SN-03217-2022
	SN-03209-2022
	SN-03211-2022
	SN-03212-2022
	SN-03213-2022
	SN-03214-2022
	SN-03215-2022
LIFTEO MLA	SN-03223-2021
	SN-03220-2021
	SN-03224-2021
	SN-06221-2022
	SN-06220-2022
	SN-02157-2021
	SN-03217-2021
SN-03102-2022	

1. Problem omschrijving:

Een analyse van de oorzaken van het recentelijk gemelde incident bracht aan het licht dat wanneer het tweekunts juk type 2P45 asymmetrisch en vaak wordt belast met het gewicht van de patiënt, vermoeidheid van het materiaal van de bevestigingspen kan optreden, wat resulteert in een geleidelijk verlies van de integriteit van de bevestiging en breuk, waarbij een patiënt is gevallen.

In een poging om de grootst mogelijke veiligheid te garanderen bij het gebruik van de Diana II ELA, Diana II MLA, Lifteo ELA en Lifteo MLA mobiele patiënten liften, heeft de fabrikant besloten om de type 2P45 jukken te vervangen door het type 2P45 juk met een versterkte spindel. met extra bescherming tegen verdraaien van de kop van de bout waarmee de spindel is bevestigd.

2. Adviseren over te nemen acties door de gebruiker:

Het geautoriseerde service centrum van de fabrikant zal de tweekunts jukken van het type 2P45 in de liften met de hierboven vermelde serienummers vervangen door de jukken van het type 2P45 van versterkte constructie die gratis worden geleverd op de met de gebruikers overeengekomen data.

Bij ontvangst van type 2P45 juk met versterkte constructie dient de vervanging zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd (leverdatum wordt verwacht in de 31e week van 2022), maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst.

3. Verzending van deze veiligheidswaarschuwing:

Deze kennisgeving moet worden doorgegeven aan iedereen die op de hoogte moet zijn binnen uw organisatie of aan elke organisatie waar de liften met de hierboven vermelde serienummers zijn verspreid.

Gelieve dit bericht door te geven aan andere organisaties waarop deze actie gevolgen heeft.

Houd deze kennisgeving en de daaruit voortvloeiende actie gedurende een passende periode op de hoogte om de effectiviteit van de corrigerende actie te garanderen.

4. Contact referentie persoon:

Meden-Inmed, ul. Wenedów 2a, 75-847, Koszalin, Polska

Karol Wojciechowski, e-mail: kwojciechowski@meden.com.pl

Marek Urbanowicz, e-mail: murbanowicz@meden.com.pl

Bevestig de ontvangst van deze kennisgeving en de voltooiing van de hierboven beschreven vervanging van de 2P45-jukken in de Diana II ELA-, Diana II MLA-, Lifteo ELA- en Lifteo MLA-liften met de serienummers die hierboven op het bijgevoegde formulier staan vermeld.

Ondergetekende bevestigt dat deze kennisgeving aan de bevoegde regelgevende instantie is gemeld.

Getekend door: ...