


Bijlage 2

Kalibratiegids voor armwagen

Deze gids bevat bijgewerkte instructies om (1) te bepalen of er een kalibratiefout van de armwagen is en (2) te herstellen van een kalibratiefout van de arm. Nadat de armkalibratie is voltooid, moet het logboek **Messages (Berichten)** altijd worden bekeken vanuit het scherm Surgery (Chirurgie) om te bevestigen dat er geen fouten in de armkalibratie zijn. In het geval van een armkalibratiefout, start u de armwagen opnieuw door de armwagengegevenskabel los te koppelen en weer aan te sluiten.

1. Als een arm een probleem ondervindt bij het kalibreren, zal het scherm System Checks (Systeemcontroles) de specifieke arm met de fout tonen en opties bieden om de arm opnieuw te kalibreren of de arm te negeren en door te gaan.

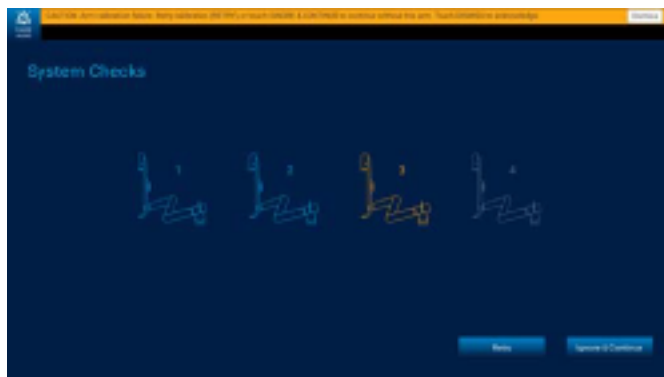

Als de kalibratie van een arm mislukt is, selecteer dan niet de knop **Retry (Opnieuw proberen)** of **Ignore & Continue (Negeren en doorgaan)**.

Start in plaats daarvan de opnieuw op door de volgende stappen uit te voeren:


- a. Koppel de gegevenskabel van de armwagen los van de arm met de fout. De arm wordt uitgeschakeld en het systeem geeft een bericht weer dat de arm niet langer is aangesloten.




- b. Sluit de gegevenskabel van de armwagen weer aan. Wanneer de arm volledig is opgestart, zullen de leds van de armwagen groen oplichten en zal het systeem de aangesloten arm detecteren en het volgende bericht weergeven:

“Arm [ARM #]: New arm detected. Make sure arm is not over patient, and no instrument or port is attached. Touch CALIBRATE when ready.” (Arm [ARM #]: Nieuwe arm gedetecteerd. Zorg ervoor dat de arm niet over de patiënt is gepositioneerd en dat er geen instrument of poort is aangesloten. Tik op CALIBRATE (KALIBREREN) als u klaar bent.)

© 2021 Medtronic. Alle rechten voorbehouden

 Covidien Inc. 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 VS

 Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, Nederland

Medtronic en het Medtronic-logo zijn handelsmerken van Medtronic.

Alle andere merken zijn handelsmerken van (een dochteronderneming van)

™* Merknamen van derden zijn handelsmerken van de desbetreffende

2022-03



CE 2797

Medtronic.
eigenaren.