

Beschrijving aanpassen klikgesp CloudCuddle Junior.



Het betreft de zwarte banden die de CloudCuddle bevestigen aan het matras van het bed. In totaal gaat het om **4 klikgespen**.


- 1 x korte zijde
- 3 x lange zijde

Controleren klikgesp

Je controleert of de klikgesp juist is gemonteerd door de zwarte band strak te trekken. Bekijk of de tanden van de gesp de juiste kant op wijzen. Zie hieronder voorbeelden.

Klikgesp correcte wijze

Tanden wijzen naar de kant waar de band aan de tent bevestigd is.

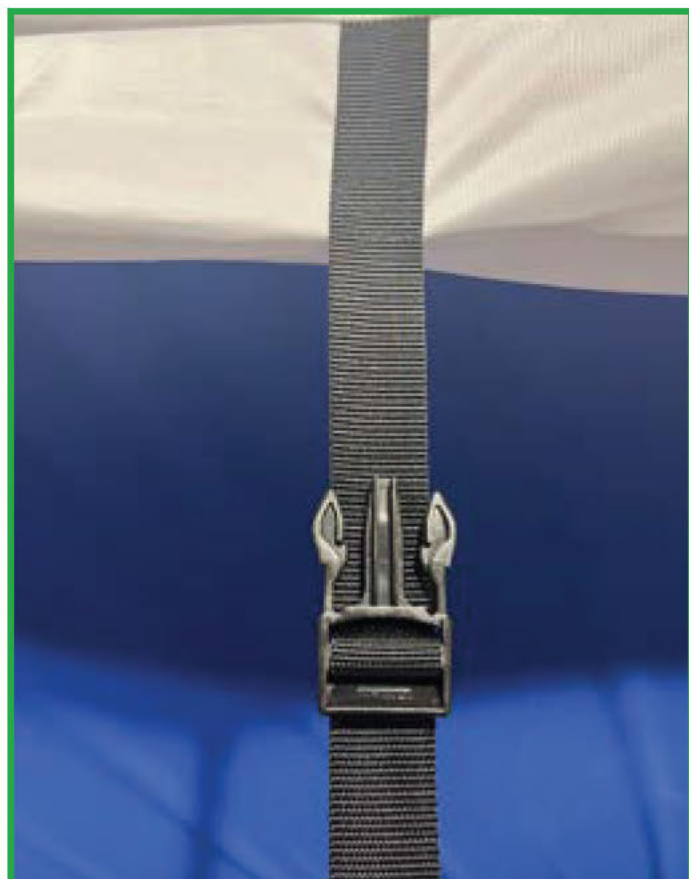

Klikgesp incorrecte wijze

Tanden wijzen naar het uiteinde van de zwarte band.



Herstellen klikgesp bevestiging

Is de klikgesp goed bevestigd? Dan hoef je geen actie te ondernemen.

Is de klikgesp fout bevestigd? Volg dan onderstaande stappen en/of bekijk [onze video](#) om de klikgesp goed te bevestigen.

- Schuif de klikgesp van de band. Dit kan lastig zijn, doordat de band aan het uiteinde is doorgestikt.
- Leg de klikgesp in de juiste richting zoals onderstaand voorbeeld (richting de tent, met de juiste kant naar boven).

Klikgesp juiste kant boven



Klikgesp onjuiste kant boven

- Te herkennen aan het patroontje.



- Rijg het band via de onderkant naar boven door de eerste opening (foto 1).

Foto 1



- Rijg band via bovenkant naar de onderkant (foto 2).

Foto 2



- Trek het band aan (foto 3).

Foto 3



Controleer nu of alle klikgespen correct bevestigd zijn.