

Bericht inzake de veiligheid in het veld (FSN) Sectra Workstation IDS7

Mogelijk om per ongeluk meerdere cases tegelijk af te melden

Deze FSN bevat belangrijke veiligheidsinformatie over Sectra Workstation IDS7 [IDS7].

Sectra dringt er bij alle klanten die deze FSN ontvangen op aan om de hieronder beschreven acties te ondernemen.

Omvang	Klanten die deze FSN ontvangen.
Aandacht	Verantwoordelijk voor de rapportageworkflow op elke locatie van de klant.
FSN-referentie	DOC-EMAO-DF5CE9
FSCA-referentie	DOC-EMAO-DEW9PY
Dit is er gebeurd	Sectra heeft een risico in de rapportageworkflow ontdekt. Er zijn geen incidenten als gevolg van dit risico in het veld gemeld.
Getroffen producten en versies	Sectra Workstation IDS7 26.2 met IDS7-rapportagepakket
Beschrijving van het productprobleem	In Sectra Workstation IDS7 is het mogelijk om per ongeluk meerdere rapporten te ondertekenen als u meerdere keren op de knop "Authoriseren" klikt terwijl het systeem niet reageert. Dit kan ertoe leiden dat rapporten onbedoeld worden ondertekend zonder dat de gebruiker de rapporten heeft bekeken. Als de voorlopige beoordeling door de eerste arts niet correct was, kan dit leiden tot een verkeerde diagnose of behandeling.
Klinische gevolgen	Onjuiste diagnose of behandeling.
U moet de volgende acties ondernemen	Gebruik de knop "Authoriseren" " pas als uw systeem gepatcht is. Gebruik in plaats daarvan de knop Ondertekenen op de spraakmicrofoon of de knop Ondertekenen in de rapportweergave.
Sectra heeft de volgende acties ondernomen	A1. Sectra heeft een patch opgesteld waarmee het probleem voor Sectra Workstation IDS7 versie 26.2 en hoger wordt opgelost. A2. Sectra zal de patch zo snel mogelijk op alle getroffen systemen toepassen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de klant. A3. Sectra houdt het gebruik van de defecte knop actief in de gaten en zal klanten waarschuwen als het gebruik wordt waargenomen.
Terugrapporteren	Bevestig aan uw Sectra-klantvertegenwoordiger dat u deze kennisgeving hebt ontvangen.

Neem contact op met uw Sectra-klantvertegenwoordiger als u vragen heeft over deze kennisgeving.

Linköping 2025-03-26

