

Field Safety Notice
Invacare Birdie tillift

Datum: 17-Jun-2025

Ref. Invacare: FSN_01_2025_Birdie lifter_Carabineer

Ref. Infarmed: 1324/2025

Belangrijke informatie:

In het belang van de veiligheid van onze gebruikers brengt Invacare deze belangrijke informatie onder uw aandacht.

Naar aanleiding van een serieus incident met betrekking tot de Invacare Birdie-tillift en de bevestiging van de karabijnhaak, wil Invacare u eraan herinneren hoe belangrijk het is om de karabijnhaak correct in de Birdie-liftarm te monteren en het tiljuk correct aan de karabijnhaak te bevestigen.

De gebruiksaanwijzing van de Invacare Birdie-tillift legt gedetailleerd het juiste gebruik en de juiste bediening van de bevestiging van de karabijnhaak en het tiljuk uit (paragraaf "4.4 – Het tiljuk monteren").


De bij dit product geleverde gebruiksaanwijzing dient te worden gelezen en begrepen voordat het product gebruikt wordt. De gebruiksaanwijzing van de Invacare Birdie bevat alle informatie om het apparaat op een correcte en veilige manier te gebruiken en te bedienen en dient altijd de basis te vormen voor eventuele trainingen voor het apparaat.

Om goede prestatie en veiligheid te garanderen, mag het product uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde gebruik en moet de informatie in de gebruiksaanwijzing altijd worden opgevolgd.

Verder is het belangrijk om te controleren dat de karabijnhaak altijd in de juiste montagepositie blijft. Om hiervoor te zorgen kan de karabijnhaak niet volledig draaien zonder weerstand, binnen de kunststof onderdelen waarop hij is gemonteerd. Als dit gebeurt, betekent dit dat de kunststof onderdelen versleten zijn en vervangen moeten worden.

Daarom heeft Invacare besloten om de huidige onderhoudschecklist in de gebruiksaanwijzing van het middel te verbeteren en onder het kopje "De tiljuk" een extra punt toe te voegen om dit specifieke onderwerp tijdens het reguliere onderhoud te controleren. Er zijn ook afbeeldingen bijgevoegd die de juiste en onjuiste posities van de karabijnhaak laten zien.

Zie de onderstaande afbeelding:

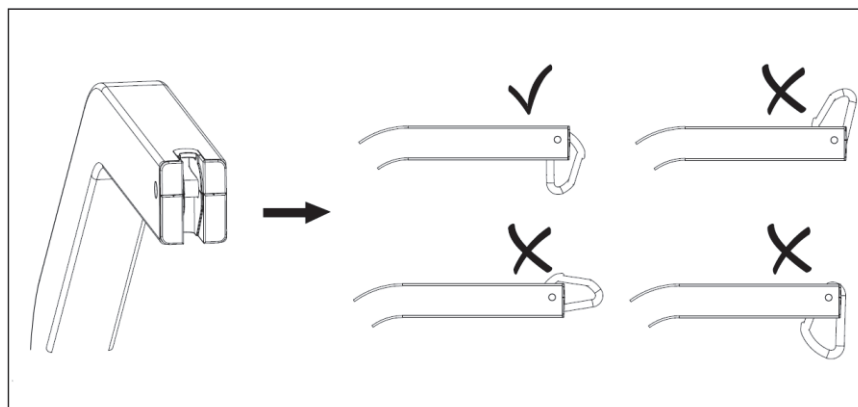

Bijgevoegd bij deze veiligheidsmededeling vindt u een addendum (productnummer 60148571-A) dat u kunt toevoegen aan de gebruiksaanwijzing van de Birdie-tillift, waarin de bovengenoemde update wordt weergegeven.

Waarom wordt u gecontacteerd?

Deze informatie is relevant voor alle gebruikers van de Invacare Birdie-tillift (ongeacht het serienummer). Volgens onze gegevens heeft u een of meer Invacare Birdie-tilliften ontvangen.

Welke maatregelen zijn vereist?

De verstrekker dient alle betrokken gebruikers te informeren over de inhoud van deze veiligheidswaarschuwing.

Dit addendum dient bewaard te worden samen met de actuele gebruiksaanwijzing van de Birdie Tillift.

Deze bijgewerkte onderhoudschecklist dient altijd de basis te vormen voor het uitvoeren van het reguliere onderhoud van het apparaat.

Zorg ervoor dat de informatie in deze kennisgeving beschikbaar is voor alle relevante medewerkers binnen uw organisatie en/of klantenbestand, en dat u gedurende een passende periode op de hoogte blijft.

Invacare bevestigt dat de relevante bevoegde instanties op de hoogte zijn gesteld van deze veiligheidskennisgeving.

Dank u voor uw onmiddellijke aandacht voor deze belangrijke kwestie.

Wij stellen uw medewerking op prijs.

Als u vragen heeft over deze veiligheidsmededeling of als u aanvullende informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met:

Technische Dienst Invacare B.V.

Tel. : +31 318 695 757