

Datum van verzending brief

GE HealthCare Ref. nr. 85491

Aan: **Persoonlijke gegevens**
[Redacted recipient information]

BETREFT: Belangrijke veiligheidsmededeling voor Centricity Universal Viewer

Veiligheids- probleem

GE HealthCare heeft een mogelijke kwetsbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging vastgesteld die van invloed is op bepaalde versies van Centricity Universal Viewer (zie de lijst met getroffen producten in deze brief). Inloggegevens van gebruikers kunnen op het lokale werkstation van de klant worden blootgesteld, waardoor onbevoegde personen mogelijk de beschikbaarheid van het systeem kunnen beïnvloeden en/of gegevens kunnen manipuleren. Dit probleem kan alleen optreden als u Microsoft Edge gebruikt en uw site niet is geconfigureerd om gebruikers te authenticeren via het netwerkaccount van de organisatie (bijvoorbeeld Active Directory/LDAP).

Er zijn aan GE HealthCare geen verwondingen of onbevoegde toegang tot patiëntgegevens gemeld als gevolg van dit probleem.

Door de klant/ gebruiker te nemen maatregelen

In afwachting van correcties van GE HealthCare kunt u uw apparaat blijven gebruiken door de onderstaande instructies te volgen:

Zorg ervoor dat werkstations beschikken over passende beveiligingsmaatregelen volgens de producthandleidingen.

Implementeer netwerkaccountverificatie door gebruik te maken van Active Directory/LDAP-services voor gebruikersbeheer.

Als u uw netwerkaccount op uw locatie niet kunt verifiëren, neem dan contact op met GE HealthCare Service om tijdelijke maatregelen aan te vragen om het probleem te verhelpen.

Zorg ervoor dat alle potentiële gebruikers binnen uw instelling geïnformeerd worden over deze veiligheidsmededeling.

Bewaar dit document voor uw administratie.

Vul het bijgevoegde bevestigingsformulier in en stuur het terug naar

Bedrijfsgegevens
[Redacted contact information]

**Details
betrokken
producten**

De volgende producten met de onderstaande softwareversies zijn hierbij betrokken.

Producten	Apparaatidentificatienummer / GTIN
Centricity Universal Viewer Software versies 7.0 tot 7.0 Sp2.0.1	00840682145794
Centricity Universal Viewer Software versies 6.0 tot 6.0 Sp10.4.1	00840682103800
Centricity Universal Viewer Software versies 5.0 SP6 tot UV 5.0 SP7.1	Niet van toepassing

**Product-
correctie**

GE HealthCare zal alle betrokken producten kosteloos voor u corrigeren. Een vertegenwoordiger van GE HealthCare zal contact met u opnemen om het probleem te verhelpen.

**Contact-
informatie**

Neem bij vragen of zorgen in verband met deze mededeling contact op met GE HealthCare Service of met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger.

Telefoon **Bedrijfsgegevens**

E-mail **Bedrijfsgegevens**

GE HealthCare bevestigt dat dit bericht is gemeld aan de betreffende bevoegde instantie.

U kunt er zeker van dat het handhaven van een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit onze hoogste prioriteit is. Bij eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact met GE HealthCare opnemen via de bovenstaande contactinformatie.

Met vriendelijke groet,

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

GE HealthCare

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

GE HealthCare

**BEVESTIGING VEILIGHEIDSMEDEDELING
ANTWOORD VEREIST**

Vul dit formulier a.u.b. in en retourneer het aan GE HealthCare, zo spoedig mogelijk na ontvangst en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst. Hiermee wordt de ontvangst van en het inzicht in de veiligheidsmededeling bevestigd.

Naam instelling: _____

Adres: _____

Stad/Provincie/Postcode/Land: _____

E-mailadres klant: _____

Telefoonnummer klant: _____

Door dit formulier te ondertekenen bevestigen wij dat wij de bijgaande Veiligheidsmededeling hebben ontvangen en begrepen, en dat wij alle mogelijke gebruikers hebben geïnformeerd en passende maatregelen hebben genomen en zullen nemen in overeenstemming met deze mededeling.

Vermeld de naam van de verantwoordelijke persoon die dit formulier heeft ingevuld.

Handtekening: _____

Naam in blokletters: _____

Functie/Titel: _____

Datum (DD/MM/JJJJ): _____

**Om dit formulier elektronisch in te vullen,
scant u de onderstaande QR-code.**



**Om dit formulier via e-mail in te vullen, scant u
het ingevulde formulier of maakt u er een foto
van en stuurt u een e-mail naar:**

Bedrijfsgegevens

