

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING

Terugroepactie van leeninsulinepompen uit de MiniMed™ 600- en 700serie

Terugroeping

Productnamen	Model/CFN-nummers	Serienummers
MiniMed™ 640G-insulinepomp	MMT-1711, MMT-1712	Zie bijlage A
MiniMed™ 670G-insulinepomp	MMT-1781, MMT-1782	
MiniMed™ 780G-insulinepomp	MMT-1885CLW, MMT-1886CLW	

Juli 2026

MiniMed-referentie: FA1568

uniek EU-registratienummer van de fabrikant (SRN): US-MF-000023100

Beste lid van de MiniMed-community,

We schrijven u in verband met een belangrijke veiligheidsmededeling over uw

MiniMed™ leeninsulinepomp. Uw veiligheid en welzijn staan bij ons hoog in het vaandel, en we willen ervoor zorgen dat u over alle informatie beschikt die u nodig hebt om uw diabetes veilig onder controle te blijven houden.

Beschrijving probleem:

Een intern onderzoek wees uit dat sommige leenpompen die aan klanten in Europa werden geleverd, mogelijk zijn gereinigd met producten die **schade kunnen veroorzaken aan de behuizing of het toetsenbord van de pomp**, waardoor mogelijk vocht de interne elektronica van de pomp kan binnendringen. Als er vocht in de interne onderdelen van de pomp terechtkomt, kan dit invloed hebben op de manier waarop de pomp insuline toedient, waardoor er te veel of te weinig wordt toegediend, wat het risico op hyperglykemie, hypoglykemie en/of diabetische ketoacidose (DKA) kan vergroten.



Sinds 9 juni 2026 zijn er drie (3) klachten gemeld met betrekking tot dit probleem, maar er is geen schade gemeld. Vanwege het mogelijke risico dat aan het licht is gekomen, nemen we echter proactief maatregelen om de mogelijk getroffen leenpompen terug te halen.

Vereiste acties:

1. Stop met het gebruik van uw MiniMed™-leenpomp en stuur deze zo snel mogelijk terug naar MiniMed.
2. **Neem contact op met uw zorgverlener om ervoor te zorgen dat u over reservevoorraden voor uw insulinetherapie of een alternatief plan beschikt**, zoals kort- en langwerkende insulines en injectiespuiten, inclusief doseringsinstructies van uw zorgverlener.
3. **Neem contact op met MiniMed** via 0800-3433228 (vanuit Nederland) en 0800 908 05 (vanuit België) om de retour van uw leenpomp te regelen. Een vertegenwoordiger van MiniMed zal u begeleiden door het retourproces.

Zoals altijd zijn we er om u te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we producten van de hoogst mogelijke kwaliteit leveren. Als u nog vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u bellen met 08003433228 (vanuit Nederland) en 0800 908 05 (vanuit België).

Met vriendelijke groet,

MiniMed Team

APPENDIX A: Impacted Models and Serial Numbers

Part Number	Part Description	Serial Numbers	UDI-DI	Mfg. SRN	GTIN
MMT-1711, MMT-1712	MiniMed 640G Insulin Pump	See Table 1 and Table 2 below	N/A	US-MF- 000023100	00763000404550, 00763000404567
MMT-1781, MMT-1782	MiniMed 670G Insulin Pump	See Table 3 and Table 4 below	N/A	US-MF- 000023100	00763000404536, 00763000404543
MMT- 1885CLW, MMT- 1886CLW	MiniMed 780G Insulin Pump	See Table 4 and Table 5 below	Basic UDI: 0763000B00012197L New BUDI [Generated for 780G with Instinct] : 0763000B00034628	US-MF- 000023100	00763000442187, 00763000974374 and 00763000442194, 00763000974381

MiniMed 640G Insulin Pump (Model Number: MMT-1711, MMT-1712)

Table 1: MiniMed 640G Insulin Pump (Model Number: MMT-1711)

Model/CFN	Serial #
MMT-1711CLW	NG2660048H
	NG2663343H
	NG3015306H

Table 2: MiniMed 640G Insulin Pump (Model Number: MMT-1712)

Model/CFN	Serial #
MMT-1712CLW	NG2628486H
	NG2678842H
	NG2758213H
	NG2831538H
	NG2831546H
	NG2831821H
	NG2932027H
	NG2999651H
	NG3033094H
	NG3049657H
	NG3349198H
	NG3351719H
	NG3738739H

MiniMed 670G Insulin Pump (Model Number: MMT-1781, MMT-1782)

Table 3: MiniMed 670G Insulin Pump (Model Number: MMT-1781)

Model/CFN	Serial #
MMT-1781CLW	NG2665223H
	NG2716176H
	NG2748200H
	NG2748664H
	NG2755237H
	NG3547582H

Table 4: MiniMed 670G Insulin Pump (Model Number: MMT-1782)

Model/CFN	Serial #
MMT-1782CLW	NG2768190H

MiniMed 780G Insulin Pump (Model Number: MMT-1885CLW)

Table 5: MiniMed 780G Insulin Pump (Model Number: MMT-1885CLW)

Model/CFN	Serial #			
MMT-1885CLW	NG2854971H	NG3153385H	NG3508350H	NG3527580H
	NG2901117H	NG3153405H	NG3508371H	NG3527581H
	NG3080842H	NG3153416H	NG3508504H	NG3527611H
	NG3081463H	NG3153547H	NG3508511H	NG3527637H
	NG3081498H	NG3153637H	NG3508565H	NG3527642H
	NG3081525H	NG3153781H	NG3508617H	NG3527672H
	NG3081894H	NG3153788H	NG3508693H	NG3527710H
	NG3081975H	NG3153908H	NG3508698H	NG3527737H
	NG3081976H	NG3153929H	NG3508707H	NG3527760H
	NG3081982H	NG3154527H	NG3508757H	NG3527865H
	NG3082019H	NG3154689H	NG3508799H	NG3527918H
	NG3082036H	NG3154693H	NG3508903H	NG3527961H
	NG3085044H	NG3154897H	NG3509138H	NG3527989H
	NG3088436H	NG3154948H	NG3509295H	NG3528017H
	NG3088708H	NG3154995H	NG3509299H	NG3528023H
	NG3090073H	NG3155020H	NG3509452H	NG3528036H
	NG3090722H	NG3155194H	NG3509685H	NG3528061H
	NG3091491H	NG3155196H	NG3509689H	NG3528120H
	NG3091563H	NG3155202H	NG3509836H	NG3528147H
	NG3092722H	NG3155341H	NG3509850H	NG3528156H
	NG3092957H	NG3155407H	NG3509914H	NG3528158H
	NG3128715H	NG3155419H	NG3509925H	NG3528180H
	NG3128784H	NG3155557H	NG3514345H	NG3528218H
	NG3150720H	NG3155586H	NG3514375H	NG3528226H
	NG3150737H	NG3155688H	NG3514441H	NG3528378H
	NG3150780H	NG3155788H	NG3514448H	NG3539964H
	NG3150786H	NG3155908H	NG3514547H	NG3539969H
	NG3151290H	NG3155909H	NG3514566H	NG3539970H
	NG3151460H	NG3155944H	NG3514612H	NG3539999H
	NG3151508H	NG3504333H	NG3514617H	NG3540001H
	NG3151561H	NG3504598H	NG3514667H	NG3540013H
	NG3151570H	NG3505071H	NG3527165H	NG3540029H
	NG3151598H	NG3505166H	NG3527243H	NG3540046H
	NG3151716H	NG3505220H	NG3527298H	NG3540053H

Model/CFN	Serial #			
	NG3151840H	NG3505246H	NG3527468H	NG3540084H
	NG3152051H	NG3505273H	NG3527469H	NG3540191H
	NG3152085H	NG3505283H	NG3527480H	NG3540270H
	NG3152344H	NG3506727H	NG3527491H	NG3540310H
	NG3152666H	NG3507161H	NG3527505H	NG3540320H
	NG3152772H	NG3507536H	NG3527529H	NG3540581H
	NG3152774H	NG3507542H	NG3527543H	NG3540604H
	NG3153213H	NG3507547H	NG3527571H	NG3540628H
	NG3153214H	NG3508303H	NG3527574H	NG3540629H

MiniMed 780G Insulin Pump (Model Number: MMT-1886CLW)

Table 6: MiniMed 780G Insulin Pump (Model Number: MMT-1886CLW)

Model/CFN	Lot Serial #		
MMT-1886CLW	NG2966956H	NG3321081H	NG3429377H
	NG2970938H	NG3409583H	NG3429485H
	NG2986362H	NG3409587H	NG3429881H
	NG3013390H	NG3409611H	NG3430059H
	NG3057910H	NG3409656H	NG3430107H
	NG3098147H	NG3409680H	NG3430111H
	NG3136398H	NG3409697H	NG3430448H
	NG3137113H	NG3409716H	NG3437621H
	NG3139432H	NG3409807H	NG3437945H
	NG3143920H	NG3409825H	NG3437957H
	NG3144721H	NG3409831H	NG3438394H
	NG3145486H	NG3409854H	NG3438451H
	NG3145488H	NG3409925H	NG3464758H
	NG3147035H	NG3409959H	NG3465813H
	NG3147120H	NG3410005H	NG3466128H
	NG3163796H	NG3410053H	NG3466185H
	NG3166778H	NG3410092H	NG3466619H
	NG3167397H	NG3410111H	NG3466620H
	NG3167450H	NG3410166H	NG3467368H
	NG3167493H	NG3410189H	NG3467586H

	NG3167609H	NG3410227H	NG3468759H
	NG3167623H	NG3410233H	NG3469430H
	NG3167967H	NG3410243H	NG3469907H
	NG3167969H	NG3410279H	NG3470728H
	NG3168104H	NG3410304H	NG3470788H
	NG3169669H	NG3410389H	NG3471528H
	NG3169694H	NG3410398H	NG3472157H
	NG3170079H	NG3429099H	
	NG3170253H	NG3429103H	